

## Beta 2 microglobuline

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 370

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staalttype: Heparine-plasma; EDTA-plasma  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 5.0  
Transportcondities: Vol bloed: 1dag bij KT°  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: Toestel: mini Vidas  
Methode: Enzyme linked fluorescent Assay (Elfa)  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

39 j	3.47 mg/L	3.47 mg/L
39 j-59 j	3.17 mg/L	3.17 mg/L
> 59 j	3.75 mg/L	3.75 mg/L
> 120 j	1.09-2.53 mg/L	1.09-2.53 mg/L

## Extra informatie

Restricties: Heterofiele AS kunnen interfereren.  
Geen significante interferentie door bilirubine (513 $\mu$ mol/l), Hb (300 $\mu$ mol/l) en lipemische stalen (triglyceriden 5 mg/ml)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 542533  
Nomenclatuur: 542533 - 542544 B 300 Doseren van beta-2-microglobuline met een immunologische methode #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau