

INR

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 142

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Citraat plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Volbloed: = 4u. bij KT°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: ACL-TOP
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90 min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckvelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.90-1.10 INR

0.90-1.10 INR

Extra informatie

Restricties:

-Tube volledig vullen! Onvolledige vulling veroorzaakt vals verlengde stoltijden (de verhouding 1 deel citraat + 9 delen veneus bloed is van cruciaal belang)
-staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 kathetervolumes bloed verwijderd worden vooraleer de stollingstube te vullen
- geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili tot 12 mg/dl

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

554573

Nomenclatuur:

554573 - 554584 B 80 Tromboplastinetijd (prothrombinetijd), inclusief de eventuele berekening van fibrinogeen #(Maximum 1) (Cumulregel [54](#)) (Diagnoseregel [95](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau