

## Gastrine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: GAST

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Patiënt moet voor afname minstens 10 uur vasten.  
Interferentie bij lipemische of sterk gehemolyseerde sera.

Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500 µl

Stabiliteit (dagen): 0.17

Transportcondities: Diepgevroren serum

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Siemens Immulite 2000 XPI  
Siemens Immulite 2000 XPI  
Chemi Luminiscent Immuno Assay(CLIA)

Uitvoeringsfrequentie: minstens 2x/week

Antwoordtijd (dagen): 5

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

13-115 pg/ml

13-115 pg/ml

### Extra informatie

Restricties: De scheiding van de cellen moet binnen het uur gebeuren.

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559112  
Nomenclatuur: 559112 - 559123 B 450 Doseran van gastrine #(Maximum 1)(Cumulregel [88](#), [322](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-03-04

Justine Platteau