

Kreatinine 24u urine

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 451

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Alternatief Staalttype:

Minimum volume: 200 µl

Stabiliteit (dagen): 1.0

Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: AU5800
Kinetische Colorimetrie bij 520/800nm
(Compensated Jaffe method A)

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 4 u

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

800-2000 mg/24u

800-1800 mg/24u

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl), Hb (5g/L) ascorbate (50mg/dl) en Glucose (3g/dl)

Troebele urine centrifugeren

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Vals laag resultaat mogelijk bij pat. behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Hannah Segers