

Glucose CSV

Aanvraag

Synoniemen: Glycorachie
Aanvraag code LIS: 900

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 0.2
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo voor valse verlaagde waarden te vermijden
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd**Mannen****Vrouwen**

50-85 mg/dL

50-85 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl)
- Interferentie 20% voor Hb (150g/L)
- Interferentie 10% voor Lip (700mg/dl)
- Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl)
- Troebel CSV eerst afdraaien
- Stabiliteit afhankelijk van aantal cellen in CSV

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 544073
Nomenclatuur: 544073 - 544084 B 100 Dosereren van glucose #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur