

## Glucose urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 420  
Glu.kwt.URI

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Vermijd bacteriële contaminatie door staal in frigo te bewaren  
Voorkeurstaaltype: Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 0.1  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.00-15.00 mg/dL

0.00-15.00 mg/dL

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)  
Interferentie 3% voor Ascorbate (50mg/dl)  
Troebele urine eerst afdraaien

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125510  
Nomenclatuur: 125510 - 125521 B 60 Dosereren van glucose of andere  
reducerende suikers #(Maximum 1) (Cumulregel [3](#), [349](#))  
(Diagnoseregel [1](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur