

Bicarbonaat

Aanvraag

Synoniemen: CO2
Aanvraag code LIS: 177

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 0.1
Transportcondities: Snel naar labo brengen, niet stabiele parameter
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800- enzymatische methode
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4uur
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	22.0-32.0 mmol/L	22.0-32.0 mmol/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 5% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (500mg/dl)
Interferentie 5% voor Lipemie (1000mg/dl)
Hyperlipemische (>3+) stalen centrifugeren.
Hemolyse vermijden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540492
Nomenclatuur: 540492 - 540503 B 60 Doseran van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht #(Maximum 1) (Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur