

Bilirubine direct

Aanvraag

Synoniemen: - Bilirubine geconjugeerd
- Bilirubine direct

Aanvraag code LIS: 45

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staalttype:

Minimum volume: 200µl

Stabiliteit (dagen): 7.0

Transportcondities: Volbloed niet stabiel, zo snel mogelijk naar labo

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: AU5800 - Photometrische colorimetrie (Diazo methode) bij 570nm

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 4 uur

Urgentie: 90min

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.00-0.20 mg/dL

0.00-0.20 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Lipemie (300mg/dl)
Hyperlipemische en hemolytische stalen vermijden
Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540175
Nomenclatuur: 540175 - 540186 B 80 Doseran van totale bilirubine en van de fracties ervan #(Maximum 1) (Cumulregel [5](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur