

## Reumafactor

### Aanvraag

Synoniemen:	Rheumafactor RA-test
Aanvraag code LIS:	313

### Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staalttype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	8.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	<a href="#">Klik hier voor afname instructies</a>

### Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0-14 U/mL

0-14 U/mL

## Extra informatie

**Restricties:**

Interferentie 5% voor Bilirubine (40mg/dl)  
Interferentie 5% voor Hb (5g/L)  
Interferentie 10% voor Lipemie (1000mg/dl)

Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk  
Stalen met RF >1500IU/ml ? Valse verlaagde waarden zonder 'flag'

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

## Overheidsinformatie

**RIZIV nomenclatuur:**

556113

**Nomenclatuur:**

556113 - 556124 B 100 Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1)

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau