

Vancomycine continu

Aanvraag

Synoniemen:	Vancocin
Aanvraag code LIS:	continu infuus: 923; Vanc.con dal: 924; Vanc.dal piek: 925; Vanc.piek

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Dal: juist voor volgende dosis Piek : 2 u na IV infuus, 1u na bolus Bij continu infuus : op gelijk welk moment
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo.
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Homogene particle-enhanced turbidimetrische immunoassay
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20.0-30.0 mg/L

20.0-30.0 mg/L

Extra informatie

Restricties:

Hemolytische stalen vermijden.

Interferentie mogelijk bij heterofiele AL.
Interferentie mogelijk bij geneesmiddelen.
(bijsluiter – internet Thermo Fisher QMS Vancomycine)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

548715

Nomenclatuur:

548715 - 548726 B 350 Dosereren van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-08-09

Bart Glibert