

Kreatinine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 170

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetische Colorimetrie bij 520/800nm
(Compensated Jaffe method A)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

28 d	0.31-0.98 mg/dL	0.31-0.98 mg/dL
28 d-1 j	0.16-0.39 mg/dL	0.16-0.39 mg/dL
1 j-18 j	0.26-0.77 mg/dL	0.26-0.77 mg/dL
> 18 j	0.67-1.17 mg/dL	0.51-0.95 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 10% voor Bilirubine (40mg/dl)
 Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
 Interferentie 10% voor Lipemie (600mg/dl)
 Interferentie 6% voor Eiwit (3-10g/dl)

Hyperlipemische stalen vermijden

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Vals laag resultaat mogelijk bij patiënten behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

540330

Nomenclatuur:

540330 - 540341 B 70 ° Doseran van creatinine #(Maximum 1)
 (Cumulregel [8](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau