

Urinezuur

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 227

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: Volbloed: 7 dagen (stijgt erna)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatisch colorimetrie bij 660/800nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

3.5-7.2 mg/dL

2.6-6.0 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 5% voor Bili.geconjugeerd (20mg/dl)
Interferentie 10% voor Bili .nt geconjugeerd (40mg/dl)
Interferentie 5% voor Hb (5g/L)
Interferentie 5% voor Lipemie (1000mg/dl)
Interferentie 5% voor Ascorbate (20mg/dl)

Hemolytische stalen te vermijden !

Vasten, vetrijk eten en zware inspanningen verhogen de concentratie.

Vals laag resultaat mogelijk bij patiënt behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

125016

Nomenclatuur:

125016 - 125020 B 60 Doseran van urinezuur #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau