

## IgG

### Aanvraag

Synoniemen: Immunoglobuline G  
Aanvraag code LIS: 188

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 240.0  
Transportcondities: Vol bloed: 11 dagen  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
30 d	2.30-14.00 g/L	2.30-14.00 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
30 d-12 md	2.50-9.00 g/L	2.50-9.00 g/L
12 md-3 j	4.40-12.00 g/L	4.40-12.00 g/L
3 j-6 j	5.00-14.00 g/L	5.00-14.00 g/L
6 j-9 j	5.50-14.00 g/L	5.50-14.00 g/L
9 j-13 j	7.00-15.00 g/L	7.00-15.00 g/L
> 13 j	7.00-16.00 g/L	7.00-16.00 g/L

### Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)
- Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
- Interferentie 10% voor Lip (1000mg/dl)
- Interferentie 10% voor RF (1200IU/ml)
- Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk
- Hyperlipemische stalen vermijden
- Stalen met IgG >300g/L ? Valse verlaagde waarden zonder 'flag'

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541214  
 Nomenclatuur: 541214 - 541225 B 125 Dosereren van IgG met een immunologische methode #(Maximum 1)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau