

## IgM

### Aanvraag

Synoniemen: Immunoglobuline M  
Aanvraag code LIS: 187

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 120.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 md	0.20-0.80 g/L	0.20-0.80 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 md-3 md	0.25-0.90 g/L	0.25-0.90 g/L
3 md-6 md	0.25-1.00 g/L	0.25-1.00 g/L
6 md-1 j	0.35-1.50 g/L	0.35-1.50 g/L
1 j-3 j	0.40-1.60 g/L	0.40-1.60 g/L
3 j-5 j	0.42-1.60 g/L	0.42-1.60 g/L
5 j-9 j	0.40-1.80 g/L	0.40-1.80 g/L
9 j-12 j	0.40-2.00 g/L	0.40-2.00 g/L
> 12 j	0.40-2.30 g/L	0.40-2.30 g/L

### Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl)
- Interferentie 10% voor Hb (5g/L)
- Interferentie 10% voor Lip (200mg/dl)
- Lipemische stalen vermijden
- Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk
- Stalen met IgM >100g/L ? Valse verlaagde waarden zonder 'flag'

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541251  
 Nomenclatuur: 541251 - 541262 B 125 Dosereren van IgM met een immunologische methode #(Maximum 1)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau