

Calcium

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 174

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 21.0
Transportcondities: 2 dagen bij KT° (daalt erna).
Langdurig contact van plasma met RBC vermijden
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Colorimetrie bij 660/700nm (BCG)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

10 d	1.90-2.60 mmol/L	1.90-2.60 mmol/L
10 d-2 j	2.25-2.75 mmol/L	2.25-2.75 mmol/L
2 j-12 j	2.20-2.70 mmol/L	2.20-2.70 mmol/L
12 j-17 j	2.10-2.55 mmol/L	2.10-2.55 mmol/L
17 j-60 j	2.15-2.50 mmol/L	2.15-2.50 mmol/L
60 j-90 j	2.20-2.55 mmol/L	2.20-2.55 mmol/L
> 90 j	2.20-2.65 mmol/L	2.20-2.65 mmol/L

Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)
- Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
- Interferentie 10% voor Lip (1000mg/dl)
- Interferentie 10% voor Mg (4mmol/L)
- Patiënt met EDTA therapie dan is de CA onderdruk
- Patiënt met gadolinium+crontrast therapie Ca bepaling onmogelijk
- Anticoagulantia zoals citraat, fluoride, oxalaat en EDTA moeten vermeden worden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540190
 Nomenclatuur: 540190 - 540201 B 60 Dosereren van calcium #(Maximum 1)
 (Cumulregel [12](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-01-28

Bart Glibert