

## Fosfaat

### Aanvraag

Synoniemen:	fosfaat anorganisch fosfaat
Aanvraag code LIS:	176

### Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staalttype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	4.0
Transportcondities:	Vol bloed: 1 uur bij KT° (stijgt erna)
Afname instructies:	<a href="#">Klik hier voor afname instructies</a>

### Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Photometrische UV methode bij 340/380nm
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

10 d	1.45-2.90 mmol/L	1.45-2.90 mmol/L
10 d-1 j	1.45-2.16 mmol/L	1.45-2.16 mmol/L
1 j-3 j	1.26-2.09 mmol/L	1.26-2.09 mmol/L
3 j-6 j	1.29-1.74 mmol/L	1.29-1.74 mmol/L
6 j-11 j	1.19-1.80 mmol/L	1.19-1.80 mmol/L
11 j-13 j	1.06-1.74 mmol/L	1.06-1.74 mmol/L
13 j-15 j	0.93-1.74 mmol/L	0.93-1.74 mmol/L
15 j-19 j	0.90-1.48 mmol/L	0.90-1.48 mmol/L
> 19 j	0.87-1.45 mmol/L	0.87-1.45 mmol/L

## Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 3% voor Bilirubine(40mg/dl)
- Interferentie 10% voor Hb (3.5g/L)
- Interferentie 10% voor Lipemie (800mg/dl)
- Hyperlipemische (>3+) stalen centrifugeren.
- Hemolytische stalen vermijden!
- Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540875  
 Nomenclatuur: 540875 - 540886 B 60 Doseran van fosfaten #(Maximum 1)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur