

## ASAT (GOT)

### Aanvraag

Synoniemen: - AST of aspartaat aminotransferase  
- SGOT of glutamaat oxaloacetaat transaminase

Aanvraag code LIS: 193

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 200 µl

Stabiliteit (dagen): 7.0

Transportcondities: 7 dagen bij KT° (daalt erna)

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: AU5800 - Kinetische UV - Photometrie bij 340nm (IFCC)

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 4 u

Urgentie: 90 min.

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

28 d	25-75 U/L	25-75 U/L
28 d-18 j	15-60 U/L	15-60 U/L
> 18 j	50 U/L	35 U/L

### Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl)
- Interferentie 5% voor Lip (300mg/dl) Sterk lipemische stalen verdunnen
- Interferentie 10% voor Pyruvate (1mmol/L)
- Hemolyse vermijden (10 x meer intracel. activiteit)
- Lipemie en pyruvaat verhogen de resultaten

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125090  
 Nomenclatuur: 125090 - 125101 B 100 Dosereren van aspartaat aminotransferasen #(Maximum 1) (Cumulregel [4](#))  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur