

Alkalische fosfatase

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 195

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800
Kinetische fotometrie bij 410/480nm (IFCC)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 u
Urgentie: 60 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

30 d	75-316 U/L	48-406 U/L
30 d-1 j	82-383 U/L	124-341 U/L
1 j-3 j	104-345 U/L	108-317 U/L
3 j-6 j	93-309 U/L	96-297 U/L
6 j-9 j	86-315 U/L	69-325 U/L
9 j-12 j	42-362 U/L	51-332 U/L
12 j-15 j	74-390 U/L	50-162 U/L
15 j-18 j	52-171 U/L	47-119 U/L
> 18 j	30-120 U/L	30-120 U/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bili (28mg/dl)
 Interferentie 10% voor Hb (4.5g/L)
 Interferentie 3% voor Lip (1000mg/dl)

Sterke hemolyse vermijden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541914
 Nomenclatuur: 541914 - 541925 B 80 ° Dosereren van de alkalische fosfatasen
 #(Maximum 1)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-03-23

Hannah Segers