

Lipase

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 205
 LIPA.AU

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 21.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetische colorimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1 j	0-8 U/L	0-8 U/L
1 j-9 j	5-31 U/L	5-31 U/L
9 j-18 j	7-39 U/L	7-39 U/L
> 18 j	67 U/L	67 U/L

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 10% voor Bilirubine (12mg/dl)
 Interferentie 10% voor Hb (5g/L)
 Interferentie 10% voor Lipemie (80mg/dl)
 Interferentie 5% voor Ascorbate (20mg/dl)

Gebruik enkel helder staal.

Hyperlipemische (>3+) stalen centrifugeren.

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Vals laag resultaat mogelijk bij patiënten behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

541833

Nomenclatuur:

541833 - 541844 B 125 Doseran van lipasen #(Maximum 1)
 (Cumulregel [337](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau