

CK

Aanvraag

Synoniemen: Creatinekinase
Aanvraag code LIS: 198

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 0.5
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: 5800 - Kinetische UV - Photometrie bij 340/660nm (IFCC)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

171 U/L

145 U/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (5g/L)
Interferentie 3% voor Lipemisch (1000mg/dl)
Hemolyse strikt vermijden
Contact met licht zoveel mogelijk vermijden.
EDTA/Citraat/oxalaat vermijden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541693
Nomenclatuur: 541693 - 541704 B 100 ° Doseren van creatine kinasen
#(Maximum 1) (Cumulregel [10](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur