

H.pylori aanwezigheid (PCR)

Aanvraag

Synoniemen: Helicobacter pylori PCR biopsie
Aanvraag code LIS: Helico.PCR.biopt

Staal

Patiëntvoorbereiding: Op verpleegafdeling of polykliniek

Het wordt aanbevolen om monsters te nemen buiten blootstelling aan antibiotica (min.4 weken) en maagzuurremmers (min.2 weken) voor gevoeligheidstests op kweekbasis !

Alternatief Staalttype:
Minimum volume:
Transportcondities:

H.pylori is gevoelig voor uitdroging, kamertemperatuur en luchtatmosfeer !!! De kiem overleeft maximum 30à 45 minuten bij KT in normale atmosfeer.

Het Biopt wordt ASAP in een eSwab geplaatst en zo snel mogelijk naar labo gebracht. Indien staal in steriel fysiologisch serum (0.9% NaCl) toekomt in het labo brengt men het biopt ASAP over naar een eSwab.

Analyse

Uitvoerend Labo: UCL Clin.Univ.Mont-Godinne
Toestel: Identificatie en gevoeligheidsbepaling door moleculaire technieken

Uitvoeringsfrequentie:
Antwoordtijd (dagen):
Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie:
EKE deelname:
Retam:

Verantwoordelijke: Bart Glibert

Extra informatie

Restricties: <https://www.sciensano.be/nl/nrc-nrl/nationaal-referentiecentrum-nrc-voor-helicobacter-pylori>

Dit formulier moet ingevuld worden door de aanvragende arts en een klinisch bioloog.

Staal opsturen met IHCT.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550373
Nomenclatuur: 550373 - 550384 B 400 Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans