

Viscositeit

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel spermatozoa telling/mobiliteit : 772

Staal

Patiëntvoorbereiding:	- Onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 tot 5 dagen. - Vooraleer tot de ejaculatie over te gaan, dient de man vooraf te wateren. - Voor de zaadlozing het potje ongeveer op lichaamstemperatuur brengen. - Het zaadmonster wordt opgewekt door masturbatie en rechtsreeks opgevangen in een steriel potje. - Het potje wordt meteen goed afgesoten en op lichaamstemperatuur gehouden tot afgifte in het labo (binnen het uur) - Wanneer een deel van het staal verloren is gegaan, dient dit gemeld te worden. - Voor een behoorlijke evaluatie moeten 2 semenmonsters worden onderzocht (interval van 7 dagen tot 3 maand)
Voorkeurstaaltype:	Sperma
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	Een druppel per onderzoek
Transportcondities:	Binnen het uur afgeven in het labo en bewaren tussen 20°C en 40°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Microscopisch onderzoek
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	8 u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja

Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2 cm	

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans