

Tijdstip afname

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel spermatozoa telling/mobiliteit : 772

Staal

- Patiëntvoorbereiding:
- Onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 tot 5 dagen.
 - Vooraleer tot de ejaculatie over te gaan, dient de man vooraf te wateren.
 - Voor de zaadlozing het potje ongeveer op lichaamstemperatuur brengen.
 - Het zaadmonster wordt opgewekt door masturbatie en rechtsreeks opgevangen in een steriel potje.
 - Het potje wordt meteen goed afgesoten en op lichaamstemperatuur gehouden tot afgifte in het labo (binnen het uur)
 - Wanneer een deel van het staal verloren is gegaan, dient dit gemeld te worden.
 - Voor een behoorlijke evaluatie moeten 2 semenmonsters worden onderzocht (interval van 7 dagen tot 3 maand)
- Voorkeurstaaltype: Sperma
- Alternatief Staaltype:
- Minimum volume: Een druppel per onderzoek
- Transportcondities: Binnen het uur afgeven in het labo en bewaren tussen 20°C en 40°C
- Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

- Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
- Toestel: Microscopisch onderzoek
- Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
- Antwoordtijd (dagen): 8 u
- Urgentie:
- Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans