

Tijdstip onderzoek

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel spermatozoa telling/mobiliteit : 772

Staal

Patiëntvoorbereiding: Binnen het uur afgeven in het labo en bewaren tussen 20°C en 40°C

Voorkeurstaaltype: Sperma

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: Een druppel per onderzoek

Transportcondities:

- Onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 tot 5 dagen.
- Vooraleer tot de ejaculatie over te gaan, dient de man vooraf te wateren.
- Voor de zaadlozing het potje ongeveer op lichaamstemperatuur brengen.
- Het zaadmonster wordt opgewekt door masturbatie en rechtsreeks opgevangen in een steriel potje.
- Het potje wordt meteen goed afgesoten en op lichaamstemperatuur gehouden tot afgifte in het labo (binnen het uur)
- Wanneer een deel van het staal verloren is gegaan, dient dit gemeld te worden.
- Voor een behoorlijke evaluatie moeten 2 semenmonsters worden onderzocht (interval van 7 dagen tot 3 maand)

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: Microscopisch onderzoek

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 8 u

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans