

APTT

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 145

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Citraat plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Volbloed (KT): 4-8u bij KT°
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: ACL-TOP - Turbidimetrische klonterdetectie-kinetisch met Actin FS®
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

25.1-36.5 sec

25.1-36.5 sec

Extra informatie

Restricties:

tube volledig vullen! Onvolledige vulling veroorzaakt vals verlengde stoltijden (de verhouding 1 deel citraat + 9 delen veneus bloed is van cruciaal belang)

- staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 kathetervolumes bloed verwijderd wordt vooraleer de stollingstube te vullen
- geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili tot 12 mg/dl
- de APTT-bepaling alleen volstaat niet voor het uitsluiten van hemofilie A

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

554676

Nomenclatuur:

554676 - 554680 B 100 Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd #(Maximum 1)(Cumulregel [107](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau