

IJzer

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 131

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 21.0
Transportcondities: Binnen 2 uur op labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800.1 - Photometrische colorimetrie bij 600/800 nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 uur
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50-170 µg/dL

50-170 µg/dL

Extra informatie

Restricties: Hemolytische/Lipemische stalen vermijden
Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (1g/L), Lipemie (100mg/dl)
, Koper (1mg/dl), Immunoglobulinen (50g/L), Triglyceriden (300mg/dl)
Verhoogde Immunoglobulinen (gammopathie) interfereren.
Bij IV toediening van ijzerdextranen (desferal) wordt circulerend dextraan gebonden ijzer voor 20 à 30% mee- gedoseerd. Dit geeft een overschatting van het fysiologisch beschikbare proteïnen gebonden ijzer. De hoeveelheid (en de overschatting) varieert snel in functie van de tijd.

Stalen worden best 's ochtends bij nuchtere patiënten afgenomen omdat de ijzerwaarden in de loop van de dag met 30% dalen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540551
Nomenclatuur: 540551 - 540562 B 100 Dosereren van ijzer #(Maximum 1)
(Cumulregel [15](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur