

Cholesterol

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 225

Staal

Patiëntvoorbereiding: Afname bij nuchtere patiënt (min. 12uur)
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatische colorimetrie bij 540/600nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	140-190 mg/dL	140-190 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bilirubine (8mg/dl) Interferentie 10% voor Hb (5g/L)
Interferentie 3% voor Lipemie (1000mg/dl)
Interferentie 10% voor Ascorbate (3mg/dl)
Vals laag resultaat mogelijk bij patiënt behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.
Interferentie mogelijk bij Metamizole
Icterische stalen en anticoagulantia vermijden !

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540271
Nomenclatuur: 540271 - 540282 B 70 Doseran van totale cholesterol
#(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur