

INR (backup)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 142

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities: Volbloed: = 4u. bij KT°C

Analyse

Uitvoerend Labo: V.Z.W. Werken Glorieux GEM3000
Toestel: ACL-TOP
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90 min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Extra informatie

Restricties:

- Tube volledig vullen! Onvolledige vulling veroorzaakt vals verlengde stoltijden (de verhouding 1 deel citraat + 9 delen veneus bloed is van cruciaal belang)
- staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 kathetervolumes bloed verwijderd worden vooraleer de stollingstube te vullen
- geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili

tot 12 mg/dl

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-12-13

Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.